

# KL MED-S és KL MED-R

## hang- és fényjelzéses nővérhívó rendszer

**Egy egyszerű, megbízható rendszer tartós, masszív használatra tervezve, rugalmas lehetőségekkel.**

A **KL MED-S** nővérhívó berendezés hang- és fényjelzést ad a beteg- vagy pácienshívásokról, illetve a mellékhelyiségi vészhívásokról. Telepítését olyan környezetben ajánljuk, ahol ez a hívásmód elegendő, nincs szükség beszédkapcsolatra illetve egyéb kényelmi szolgáltatásokra. A **KL MED-R** nővérhívó magában foglalja a hang- és fényjelzéses rendszer tulajdonságait, de működése vezeték nélkül, rádiófrekvencián működik.

### **Fő alkalmazási terület:**

általános kórházi betegosztályok, intenzív-, krónikus osztályok, szociális vagy idősek otthona.

A rendszer előnye a megbízhatóság, az egyszerű, könnyű kezelhetőség, a nagyfokú rugalmasság. Egyszerű kábelezése és telepíthetősége lehetővé teszi akár meglévő, régi rendszerek cseréjét is a rendszer újraszervezése nélkül, de a **KL MED-R** rendszer esetében nincs szükség kábelezésre sem. Telepítését bárki el tudja végezni – a rendszerre vonatkozó telepítési segédlet ismeretében – aki gyengeáramú villamos végzettséggel, vagy ismeretekkel rendelkezik.

A rendszer telepítése után az bármikor egyszerűen tovább bővíthető, mind a központ, mind a szobák száma, mind pedig a hívást kezdeményező pontok vonatkozásában.

### **A KL MED-S rendszer rövid leírása**

A központban 8 karakteres alfanumerikus kijelzőn kerül megjelenítésre a hívó kórterme, megkülönböztetve a **mellékhelyiségből érkező hívásokat** (pl. „5 KORT”, vagy „5 KT WC”), illetve információ látható a **kórtermi nővérjelenlétről**, vagy a **hívástörlésről** (pl. „5 KT JLN”, vagy „5 KT TOR”). A kijelzett információk természetesen az egyéni igényeknek megfelelően szabadon megválaszthatóak.

A központban – a vonatkozó szabvány szerint – **nem megengedett** a hívás törlése, a nővérnek minden esetben fel kell keresni a hívás helyét, és csak **ezen a helyen** lehet megszüntetni a hívást.

Az ajtók felett elhelyezett LED-es kijelző erős környezeti megvilágítás esetén is jól láthatóan jelzi a hívást, vagy a nővérjelenléteket. A rendszer rendelkezik **(nővér)követő funkcióval**: amennyiben a nővér megnyomta egy kórteremben a jelen/ törlés gombot, akkor a következő beérkező hívás ebben a kórteremben (csak hang- és fényjelzés) és a központban is jelzésre kerül.



**KL MED-S** központi egység



Nővérekészülék

A központban a hangerő szabályozható, de csak szerviz, vagy műszaki hozzáféréssel.

A központ csatlakoztatható – pl. USB porton – számítógéphez, melyen keresztül minden esemény naplózható, akár központi szerverre is. Távoli hozzáférés engedélyezése esetén minden hibaeseményről értesülhetünk, melynek következtében a hibaelhárítás azt megelőzően megkezdődhet, hogy a személyzet azt észrevette, vagy jelezte volna.

A kézi vészkapcsolók ütészálló ABS műanyagból készülnek könnyen kezelhetők, nagy felületű, vörös színű nyomógombbal.

A mellékhelyiségekben húzókapcsolók kerülnek felszerelésre.

A nővérhívó rendelkezik az **MSZ EN 60601-1-2:2008** elvégzett EMC mérés jegyzőkönyvvel is.

### További funkciók

- külső folyosói pl. mozgássérült mellékhelyiségek kezelése,
- intenzív *alközpont* kezelés,
- orvos hívás,
- folyosói összegző lámpa (pl. L-alakú folyosó esetén).

### Rendszerjellemzők

- akár 32 kórterem ellátása 1 központról,
- akár 128 vezeték nélküli, rádiófrekvenciás egység csatlakoztatható (csak KLmed-R rendszer esetén),
- alfanumerikus kijelzés a hívásokról, megkülönböztetve a mellékhelyiségi hívásokat,
- központok összekapcsolása esetén hívásátirányítási lehetőség,
- szobánként korlátlan ágyszám,
- külső-, belső mellékhelyiségek kezelése,
- könnyen takarítható fóliaszatúrás felületek,
- naplózási lehetőség, akár belső memóriával, vagy központi szerverrel is,
- beépíthető GSM rendszer – SMS küldési lehetőséggel,
- rugalmas bővíthetőség,
- gyors megbízható szerviz,
- karbantartási szerződés mellett akár 10 év garancia.

### Minősítéseink

- EN ISO 9001:2008
- MSz EN ISO 13485:2010



Kézi hívókapcsoló



Ajtólámpa



**Medical Egészségügyi Fővállalkozó és Bonyolító Kft.**

H-1147 Budapest, Kerékgyártó u. 20.

Telefon: (+36) 1 354 1465 • (+36) 1 353 4707 • Fax: (+36) 1 220 6466

www.klimexmedical.hu • e-mail: klimexmedical@klimexmedical.hu